

1. Objectif du test :

Ce prélèvement (qui correspond au scotch test) permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

2. Matériel à utiliser :

- 2 lames
- 1 scotch transparent

3. Protocole de recueil :

A effectuer au lever, avant la toilette et les premières selles.

Le recueil est à réaliser préférentiellement au laboratoire.

- 1) Demander au patient de se plier en avant
- 2) Appliquer le coté adhésif d'un scotch **transparent** sur les plis de la marge anale, et le maintenir en appuyant quelques secondes
- 3) Décoller le scotch, et le coller sur une lame (en évitant les bulles)
- 4) Répéter l'opération afin d'avoir 2 prélèvements
- 5) Mettre les lames dans un porte lames
- 6) Identifier avec **nom, prénom, date et heure du prélèvement**

4. Conservation :

Si le prélèvement est réalisé à domicile (non recommandé), celui-ci doit être apporté au laboratoire dans **un délai de 3 heures après prélèvement**.

5. Informations à fournir :

Fiche de renseignements à compléter (Facultatif)

Nom : Prénom :

Date de naissance : __ / __ / ____ Sexe : F M

➤ Date et heure du prélèvement : le __ / __ / ____ à __ H __

➤ L'enfant a-t-il des démangeaisons anales ? Oui Non

➤ L'enfant a-t-il des troubles du sommeil ? Oui Non